

Instrucciones de uso:

AcusTone es un producto sanitario que contiene ingredientes que disuelven suavemente la cera residual en el conducto auditivo externo, lo que permite una higiene adecuada del oído. Gracias a su acción, **AcusTone** ayuda a eliminar los tapones de cerumen, previene su formación y asegura una adecuada hidratación de la piel, calmando la irritación. Además, **AcusTone** recubre la piel del conducto auditivo con una película suave, previniendo el estancamiento de agua en el oído durante el baño o la práctica de deportes acuáticos. El aplicador especial permite una fácil pulverización del producto en el conducto auditivo sin crear una presión excesiva.

AcusTone:

- disuelve el cerumen residual,
- previene la formación de tapones de cerumen,
- permite una higiene adecuada de los oídos en caso de producción excesiva de cerumen, como por ejemplo en niños y personas que usan audífonos o auriculares,
- previene el estancamiento de agua en el oído durante el baño o la práctica de deportes acuáticos, en personas que tienen tendencia a las infecciones recurrentes del oído externo.

Uso y mantenimiento del producto sanitario:

Debido a su forma de aplicación, el producto se distribuye uniformemente en el conducto auditivo. Por lo tanto, no es necesario introducir el aplicador profundamente en el oído.

Niños y bebés mayores de 3 meses:

- 1 pulverización;

Adultos:

- 1-2 pulverizaciones en el conducto auditivo externo.


Para disolver los tapones de cerumen:

- usar 3-5 veces al día hasta que se disuelva la cera residual.

Efecto profiláctico e higiene adecuada del oído:

- usar 1-2 veces a la semana para evitar la formación de tapones de cerumen,
- usar directamente antes del baño para evitar el estancamiento del agua en el oído.

En niños y bebés, el producto debe ser aplicado por un adulto con precaución. No inserte el aplicador demasiado profundamente en el oído para no dañar el oído. No es necesario un enjuague adicional del conducto auditivo después de la aplicación del producto sanitario. Agitar antes de cada uso. Antes del primer uso, presione firmemente la bomba dosificadora varias veces para llenarlo y asegurar una correcta pulverización del producto. Lave el aplicador con agua corriente y séquelo suavemente después de su uso. En caso de dificultades con la aplicación, retire la punta del aplicador y vuelva a colocarlo en el dosificador.

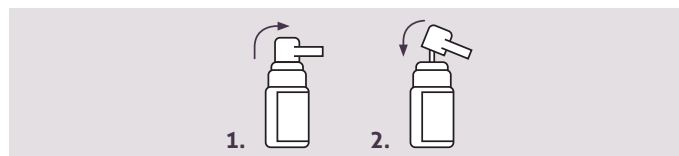

Composición:

Aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de jojoba, parafina líquida, vitamina E, polisorbato 80.

Libre de agua y conservantes.

Advertencias especiales y precauciones recomendadas:

No usar en caso de hipersensibilidad a algún ingrediente del producto sanitario. No usar en el caso de enfermedades del oído, tímpano roto o cuando haya un cuerpo extraño en el oído. No aplicar en ojos, nariz o cavidad bucal. El uso del producto sanitario en bebés y niños menores de 1 año debe consultarse con un médico. Si lo usa para disolver los tapones de cerumen, si los problemas de audición u otras molestias persisten después de 5 días de uso, consulte a su médico. Se recomienda el uso del producto sanitario por una sola persona por razones de higiene.

Lugar y condiciones de almacenamiento:

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Conservar en el embalaje original. Se debe prestar atención al mantenimiento de las condiciones adecuadas de almacenamiento del producto. No utilice después de la fecha de caducidad.



Fecha de emisión de las instrucciones de uso: 02/2025

Símbolos utilizados en el embalaje:

número de lote

fecha de caducidad

límite de temperaturas de almacenamiento permitidas

consultar las instrucciones de uso

fabricante



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice, Polonia



www.aflofarm-ori.es

Distribuidor:

Aflofarm Spain, S.L.U.
Avda. Diagonal, 327 4º 2ª, 08009 Barcelona
regulatory@aflofarm.es